

ISTRUZIONI D'USO

1. Esposizione standard

Appoggiare correttamente il lato numerato della lastrina al tubo radiogeno.

Tempo di esposizione - Adulti

	Mascellare	Mascellare
Incisivi	0.2 ~ 0.25	0.15 ~ 0.2
Premolari	0.25 ~ 0.3	0.2 ~ 0.25
Molari	0.3 ~ 0.35	0.25 ~ 0.3

Il tempo di esposizione ottimale deve venire deciso individualmente, a seconda del modello di radiografico usato.

2. Iniezione della soluzione DQD

1. Inserire il beccuccio del "PUSHER" nell'apposito canale dell'involucro.
2. Premere il tasto sul coperchio del "PUSHER" che inietterà una quantità fissa (ca. 3 cc) di soluzione.
3. Il quantitativo di soluzione da iniettare può venire controllato premendo il tasto.

Quantitativo di soluzione da iniettare

Formato lastrina	Soluzione	Pressione tasto
Standard	3 cc	1 volta
Bambini	2 cc	3/4 di pressione
Occlusali	9 cc	3 volte

3. Agitare

Agitare per 30 sec. l'involucro (fare attenzione a non schiacciare troppo forte con le dita la lastrina all'interno).

Il buon potere di contrasto della pellicola permette di lasciarla nella soluzione anche un'ora.

Quando la soluzione perde efficacia o in caso di sviluppo al di sotto dei 25°C, prolungare il tempo di agitazione fino a 40-60 sec.

4. Apertura dell'involucro

Strappare i due lembi.

5. Indurimento

Immergere la pellicola nella soluzione indurente.

6. Risciacquo

Risciacquare la lastrina indurita con acqua corrente per più di 30 minuti.

7. Asciugatura

La fase di asciugatura deve avvenire all'ombra e in ambiente ben ventilato.

PREPARAZIONE

- Soluzione indurente

La polvere bianca contenuta nella confezione deve venire disciolta in acqua (300 cc).

- Sostituzione del flacone della soluzione DQD

Svitare il coperchio in plastica ed aprire il flacone della soluzione. Avvitare e fissare la parte del "PUSHER" sul flacone in plastica.

AVVERTENZA

1. La soluzione DQD ha una proprietà alcalina molto forte. È necessario fare attenzione affinché abiti e pelle non vengano in contatto accidentalmente con la soluzione stessa.
2. Per evitare l'ossidazione della soluzione DQD nel flacone in plastica, la superficie è ricoperta da un sottile strato di paraffina. Fare attenzione a non aspirare la paraffina quando il flacone diventa quasi vuoto.
3. Una volta aperto il flacone è consigliabile usare la soluzione entro un mese.